

Comment connecter la VetLabStation IDEXX avec InterLink App ?

- Installer InterLink App sur un PC Windows connecté au réseau informatique.
- Paramétrage de la VetLabStation (IVLS)
 - l'IVLS doit être reliée au réseau de la clinique de préférence par une connexion directe par câble R45 (éviter si possible les prises CPL ou le WiFi) – Si une connexion par câble n'est pas possible, contacter le Service Technique IDEXX pour commander des prises CPL validées (00800 1234 33 99)
 - l'IVLS doit être reliée à SmartService
 - aller dans « Configuration », onglet « Logiciel de Gestion Vétérinaire » et cliquer sur « autre » et « network connection »



Puis cliquer sur OK

- Vous verrez apparaître les modifications suivantes :
 - L'icône InterLink du PC doit passer de orange  à vert 

- Apparition de l'icône suivante sur l'IVLS :



- Cliquez sur l'icône « not ready » et paramétrez comme ci-dessous

Réglez la date à partir de laquelle vous souhaitez envoyer les résultats à une date récente (le jour même ou la veille), de façon à ne pas envoyer de trop nombreux résultats probablement déjà présents dans votre logiciel

Archives existantes

Ne pas transmettre les archives créées précédemment:

< June 2011 >

June 2011						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

- Puis activez le transfert des résultats comme suit :

Transfert des résultats

Désactivé (Pas de transfert des résultats)

Activé (Transmission des archives de résultats uniquement)

Activé (Transmission des archives de résultats et du compte rendu)

Retransmettre

- L'icône « InterLink » devrait passer d'orange à vert



- **Félicitations, votre installation est terminée.**
- Les résultats d'analyses seront transmis sous format XML et PDF vers les dossiers désignés lors de l'installation de InterLink App.